



Martin.Care
Sicherheitssysteme für das Gesundheitswesen

Alarmierungsübersicht

SCC5.0 - Baby-Transponder



Die Alarmierungsarten im Überblick

Beim Baby-Transponder 2.17 werden je nach Position in einem bestimmten LF-Feld bzw. je nach Handhabung des Transponders insgesamt drei verschiedene Alarmierungsarten unterschieden:

- ☐ Allein-Alarm
- ☐ Abnahme-Alarm
- ☐ Entführt-Alarm

Wann genau einer dieser drei Alarme ausgelöst wird bzw. wann eine Alarmierung ausbleibt, erfahren Sie in den nachfolgenden Beispielen.



Allein-Alarm

Ein Allein-Alarm wird in ausgelöst, wenn

- der Baby-Transponder ohne zugehörigen Mutter- oder Pflege-Transponder allein auf einem Wickeltisch zurückgelassen wird, sofern dort eine Wickeltisch-LF angebracht ist.
- ein Baby-Transponder im Beisein eines Mutter- oder Pflege-Transponders auf dem Wickeltisch abgenommen wurde und der Mutter-bzw. Pflege-Transponder sich anschließend ohne Baby-Transponder aus dem Wickeltisch-LF-Feld herausbegibt. Zusätzlich zum Allein-Alarm wird auch ein Abnahme-Alarm erzeugt.



Abnahme-Alarm

Ein Abnahme-Alarm wird ausgelöst, wenn

- die Abnahme eines Baby-Transponders außerhalb eines LF-Erfassungsfeldes erfolgt.
- der Baby-Transponder nicht in Beisein des zugehörigen Mutter- oder Pflege-Transponders in einem Wickeltisch-LF-Erfassungsfeld abgenommen wird.
- wenn die Kontakte des Baby-Transponders außerhalb eines Wickeltisch-LF-Feldes versehentlich kurz berührt wurden (abgelegt - angelegt).
- ein Baby-Transponder im Beisein eines Mutter- oder Pflege-Transponders auf dem Wickeltisch abgenommen wurde und der Mutter- bzw. Pflege-Transponder sich anschließend ohne Baby-Transponder aus dem Wickeltisch-LF-Feld herausbegibt. Zusätzlich zum Abnahme-Alarm wird auch ein Allein-Alarm erzeugt.



Entführt-Alarm

Ein Entführt-Alarm wird ausschließlich erzeugt, wenn ein Baby-Transponder ohne einen zugehörigen Mutter- oder Pflege-Transponder in ein „verbotenes“ LF-Erfassungsfeld eingebracht wird.



Abb. Baby- und Mutter-Transponder

Keine Alarmierung

Es erfolgt keine Alarmierung, wenn

- der Baby-Transponder gemeinsam mit einem autorisierten Mutter- bzw. Pflege-Transponder ein „verbotenes“ LF-Erfassungsfeld betritt.
- der Baby-Transponder mit und ohne autorisierten Mutter-bzw. Pflege-Transponder durch ein „erlaubtes“ Ortungs-LF-Feld geführt wird.
- der Baby-Transponder im Beisein eines Mutter- oder Pflege-Transponders in einem Wickeltisch-LF-Feld abgenommen wird.
- der abgelegte Baby-Transponder gemeinsam mit einem Mutter- oder Pflege-Transponder aus einem Wickeltisch-LF-Feld herausgetragen wird.
- sich der Baby-Transponder gemeinsam mit dem Mutter- oder Pflege-Transponder in einem Wickeltisch-LF-Feld befinden und nur der Baby-Transponder allein aus diesem Feld herausgetragen wird.
- ein abgenommener Baby-Transponder allein in ein „verbotenes“ LF-Feld gebracht wird.



Martin.Care

Sicherheitssysteme für das Gesundheitswesen

www.martin.care