



SCHUTZ FÜR MENSCHEN UNTERWEGS

SafeMotion®

GPS-Ortung außerhalb von Einrichtungen



WWW.SCHUTZENGELE-SYSTEME.DE

SCHUTZ FÜR UNTERWEGS: SAFE-MOTION®

Das SafeMotion® Assistenz System wurde für Menschen mit erhöhtem Sicherheits- und Unterstützungsbedürfnis entwickelt.

Das Ziel von SafeMotion® ist es, seinen Benutzern höhere Unabhängigkeit und Selbstvertrauen zu ermöglichen. Die Safe-Motion Uhr ist jederzeit einsatzbereit, zuhause und außerhalb der eigenen vier Wände. Dabei wird der Benutzer im täglichen Leben auf nicht invasive Art und Weise durch eine Smartwatch unterstützt. Diese ist komfortabel und stets einsatzbereit.

Die Uhr bietet eine Reihe von Funktionen, welche auf die kognitiven Fähigkeiten des Trägers eingestellt werden können. Im einfachsten Fall reicht alleine das Tragen der Uhr aus, um die Alarmierung zu nutzen. SafeMotion kann aber erheblich mehr. Die Uhr hat alle Funktionen eines vollwertigen Smartphones. Somit können auch Nachrichten empfangen und/oder gesendet werden. Spezielle altersgerechte Benachrichtigungen erleichtern eine komfortable Interaktion. Eingegangene Texte werden bei Bedarf vorgelesen und mögliche Antworten z.B. als große Symbole angeboten.

Aktive und passive Alarmierung

Die Notruffunktion von SafeMotion® steht jederzeit und allorts zur Verfügung. Nach dem manuellen oder automatischen Auslösen des Notrufs werden Angehörige oder Betreuer in einer zuvor definierten Reihenfolge alarmiert. Der Alarm erfolgt mittels eines Anrufs und optional einer SMS. Diese enthält die aktuelle Position der Person in Form von GPS-Koordinaten und eine Web-Adresse, unter welcher der Standort auf einer digitalen Karte dargestellt wird. Hierfür wurde eigens für SafeMotion® ein übersichtliches Web-Portal, entwickelt. Neben der Alarmierungskette bietet SafeMotion® auch einen Direktanruf an.

Die sogenannte Alarmierungskette gibt die Möglichkeit, eine Reihe von vertrauten Personen für die Kontaktaufnahme im Notfall festzulegen. Sollte die zuerst angegebene Person auf einen Alarm nicht reagieren, wird ganz automatisch die nächste verständigt.

Hinweis: Bitte prüfen Sie vor Einsatz eines solchen Systems mit Ihrem zuständigen Amtsrichter, ob es sich in Ihrem Fall um eine freiheitsentziehende Maßnahme handelt.

ZUBEHÖR

Sicherheitsverschluss

Der Sicherheitsverschluss lässt sich mit Hilfe eines Magnetschlüssels öffnen.



Magnetschlüssel

zum Öffnen des Sicherheitsverschlusses



FUNKTIONSBEISPIEL

Positionsermittlung (1)

Die Position des Uhrenträgers kann vom Alarmempfänger jederzeit auf einem Smartphone oder Computer abgefragt werden. Für bestimmte Anwendungsfälle, wie z.B. für Personen mit Demenz, die alleine spazieren gehen, kann auch ein permanentes Positions-Tracking eingeschaltet werden, um höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten.

Bewegungszone (2)

Die Bewegungszone erlaubt die Festlegung von sicheren Bereichen auf einer digitalen Karte gekoppelt mit automatischer Alarmierung.

Nachdem im Webportal eine Bewegungszone aktiviert wurde, ist die Sicherheit des Trägers bereits gewährleistet. Sobald der Träger die Zone verlässt, wird ein Alarm ausgelöst. Dies ist insbesondere für Pflegeheime eine sehr nützliche Funktion, um den Bewohnern ein Maximum an Freiheit zu ermöglichen.



Die Meldung kann erfolgen auf:

- Smartphone
- E-Mail
- Telefon



IHRE VERBINDUNG
ZU WEITEREN INFORMATIONEN:

WWW.SCHUTZENGELE-SYSTEME.DE

Martin Elektrotechnik GmbH

Dr.-Gartenhof-Str. 4

D-97769 Bad Brückenau

Telefon: +49 (0)97 41 15 00

E-Mail: info@martin-elektrotechnik.de